

# EUROCLEAN 120

## ENZYME REINIGER FÜR DIE MECHANISCHES REINIGUNG VON MEDIZINISCHES GERÄTEN

### Eigenschaften

Enzymatisches Reinigungsmittel für die mechanische Reinigung von Medizinprodukten. Reinigungssystem mit enzymatischer Wirkung, spezifisch für die vorgehende Beseitigung von Blut und organischen Verschmutzungen von Medizinprodukten, die in der Folge desinfiziert und sterilisiert werden müssen. Geeignet für mechanische und Ultraschallreinigungen..

### Anwendungsbereiche

Vereinbar mit medizinischem Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Gummi und Glas.

### Dosis und Gebrauchsanweisungen

Bei Temperaturen zwischen 40 und 65°C in veränderlicher Dosis von 2 bis 6 ml pro Liter Wasser je nach Härte des Wassers und der Anwendungsmethode verwenden. Spülzeiten von 5 bis 15 Minuten, veränderlich je nach Art der Anlage, des Instruments oder der organischen Belastung.

### PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

### Chemische und physikalische Eigenschaften

Aussehen:	Flüssig
Dichte	1.058
pH sol.0,5%	8,0 ±0,5

### Zusammensetzung (reg.CE 648/2004):

Enzyme (protease, amilase)	< 5%
Nichtionische und amphotere Tenside	15-30%
polycarboxylates, stabilisatoren, Konservierungsmittel	15-30%

### Gültigkeit und Lagerung

Gültigkeit: 2 Jahre, in den richtigen Bedingungen gelagert.  
Lagertemperatur: 5-30°C

### Warnungen

Das konzentrierte Produkt ist irritierend. Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett.

medizinische Gerät erfüllt die Anforderungen der DM 93/42 / CEE. und Ergänzungen (Dir. 47/2007/CEE)



**Euronda Spa**, Via dell'Artigianato 7, 36030 Montecchio Precalcino (VI), Italy  
tel.: +39 0445 329811 fax: +39 0445 865246



**MONDIAL snc** via Don G. Zonta, 3 – 35010 Limena PADOVA, Italy  
Phone: 049768712 – fax 049769497 – www.mondialprod.it

### Verpackung

FM01821 3L Kanistern (Kartons mit 4 Stücke)

Die in dieser Karte vorhandenen Informationen gründen sich auf die Kenntnisse, die bei uns, am Datum der letzten Version, verfügbar sind. Der Benutzer muß sich über die Tauglichkeit und Vollständigkeit der Informationen, bezüglich des speziellen Gebrauches des Produktes, vergewissern.