


1. Druck aus dem Filter ablassen

- Wasserhahn am Wasserzulauf zudrehen.
- Netzstecker vom Aquafilter abziehen.
- Schlauch am manuellen Wasseranschluss (rechte Seite oben) anschließen und das Ende in ein leeres Gefäß führen.
- Taste neben der Leuchtdiode gedrückt halten und dabei den Netzstecker in das Gerät stecken.

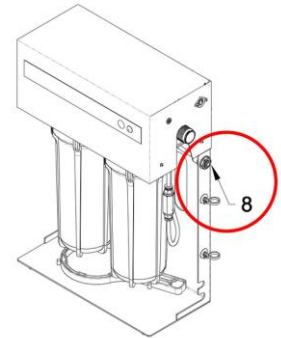

Euronda®

AQUAFILTER  

- Wenn sich die LED pink färbt Taste loslassen und Wasserauslauf in das Gerät abwarten.

2. Patronen wechseln (siehe auch Installationsanleitung)



- Behälter für die Patronen abdrehen (Abb. 2.1).
- Restwasser aus dem Behälter entleeren und neue Patronen einsetzen.
Vor dem Einsetzen Distanzringe überstreifen und Dichtung oben (Markierung UP) auflegen.
- Patronen mit der Dichtung oben in den Behälter einsetzen (Abb. 2.2).
- Behälter am Aquafilter anschrauben und gut handfest anziehen (Abb. 2.3).

3. Aquafilter spülen

- Hahn am Wasserzulauf wieder aufdrehen.
- Schritte 1. b-e wiederholen.
- Netzstecker ziehen und Schlauch vom manuellen Anschluss entfernen (falls nicht weiter genutzt).
Öffnung mit Blindstopfen verschließen.

Nach erneutem Herstellen der Stromverbindung färbt sich die LED grün und der Aquafilter ist betriebsbereit.

Euronda®

AQUAFILTER  