

Aquafilter Pro


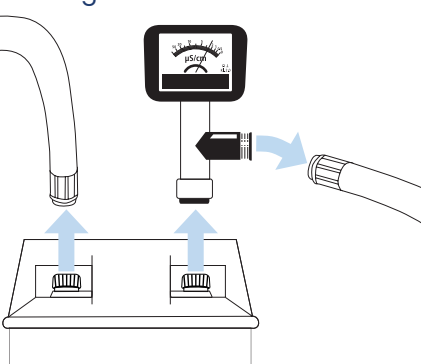







Regeneration vorbereiten



Bitte denken Sie daran, den Aquafilter Pro trocken, auslaufsicher und bruchfest für den Transport zur Regeneration zu verpacken. Befolgen Sie dazu unbedingt die nachstehende Anleitung. Eine unsachgemäße Verpackung verursacht Zusatzkosten.



Die Verpackung ist nicht oder nicht vollständig vorhanden?
Melden Sie sich bei uns unter: **02505 9389-251**.

<p>1. Wasserhahn zudrehen</p> 	<p>2. Schläuche und ggf. Leitwertmessgerät abschrauben¹</p> 	<p>3. Restwasser aus der Patrone in einen Abfluss gießen²</p> 
<p>4. Anschlüsse mit den Plastik-Schraubkappen verschließen</p> 	<p>5. Patrone im Originalkarton inklusive Dämpfungspappen (Ecken) verpacken</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;">a) </div> <div style="width: 33%;">b) </div> <div style="width: 33%;">c) </div> <div style="width: 33%;">d) </div> <div style="width: 33%;">e) </div> </div>	

¹ Zum Druck ablassen starten Sie bei zugeordnetem Wasserhahn das Abspülprogramm am Thermodesinfektor und beenden es, sobald kein Wasser mehr einläuft.

² Tipp: Für vollständige Entleerung Behälter kopfüber in einen Abfluss stellen und einige Minuten auslaufen lassen.