

To Do Täglich

1. Türdichtung reinigen / abwischen und kontrollieren.
2. Stirnseite des Kessels abwischen.
3. Helixtest durchführen.

To Do Wöchentlich

1. Vakuumtest durchführen.
2. Frisch- und Brauchwassertank leeren und reinigen.
 - Reinigung mit weichem feuchten Schwamm. Bei starker Verschmutzung etwas Alkohol
3. Kessel und Traygestell reinigen.
4. Kesselfilter reinigen (ggf. mit Druckluft) und kontrollieren.
5. SD-Speicherkarte auslesen und Daten sichern.

To Do Jährlich

1. Anpressdruck der Tür kontrollieren und ggf. nachstellen.
2. Nach 500 Zyklen (spätestens jährlich) bakteriologischen Filter wechseln
3. Nach 1.000 Zyklen (spätestens jährlich) Türdichtung wechseln
4. Nach 3.000 Zyklen oder spätestens 2 Jahren:
 - Wartung durch Kundendienst durchführen lassen
 - Validierung / erneute Leistungsqualifikation nach EN ISO 17665

To Do zur Urlaubsvorbereitung

- Entleeren, Reinigen und Trocknen von Frisch- und Brauchwassertank.