

E8 (Seriennr. beginnt mit EXF...)



Zur Navigation durch das Menü die drei Soft-Buttons unterhalb des Displays verwenden. Ihre Funktion ist am unteren Displayrand gekennzeichnet. Der Button in der Mitte dient jeweils zur Bestätigung der Auswahl bzw. Eingabe (Hakensymbol im Display).

↑ ↓ ☑	Im Hauptmenü mit den Buttons unter den Pfeilen Einstellungen anwählen und bestätigen.
↑ ↓ ☑	Zum Menüpunkt Service 1 navigieren und bestätigen.
	Zur Passworteingabe Stiftsymbol (Button rechts) wählen.
☑ << ESC	Passwort: 12345 eintragen. Jede Ziffer einzeln auswählen und bestätigen. Zum Löschen einer Ziffer << wählen. Den Vorgang abbrechen mit ESC
Ok ☑	Zum Bestätigen der Eingabe OK anwählen und mit mittlerer Taste 2 x bestätigen. Anschließend mit rechter Taste (Diskettensymbol) das Servicemenü aufrufen.
	Wartung auswählen.
☑	Bei Filterwechsel Filter auswählen. Zähler mit dem Button links zurücksetzen (Anzeige springt auf 500), mit mittlerer Taste bestätigen. Abschließend die Eingabe mit dem rechten Button (Diskettensymbol) speichern. Beim Wechsel der Türdichtung Türdichtung auswählen und genauso verfahren.
←] <<	Menü verlassen mit ←] bzw. mehrfache Auswahl und bestätigen von <<

E9 (Next) | E10 | EXL (Seriennr. beginnt mit EXA, EXB, EXC, EXD, EXL...)



1. Software-Version (SS1) prüfen
2. Zähler zurücksetzen


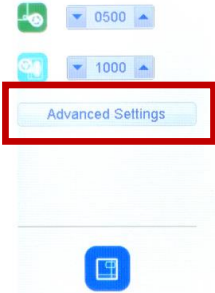




Autoklaven-Icon unten in der Mitte antippen







Rechtspfeil 2 x antippen

Software-Version notieren aus der Zeile SS1
[Wert in Klammern]

	Im Hauptmenü auf Einstellungen tippen.
	1 x Pfeiltaste nach oben und anschließend Service 1 antippen.
	In das Feld für Passworteingabe tippen. Passwort: 12345 eintragen. Mit Tippen auf die grüne Hand (unten rechts) bestätigen.
	<u>Zusatzschritt nur bei Software SS1 = 1.034/1.04:</u> Advanced Settings antippen. Techniker-Passwort eintragen und bestätigen. Diese Aktion kann nur durch einen geschulten Service-Techniker durchgeführt werden.
	Wartung antippen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Filterwechsel Icon oben links gedrückt halten bis zum Piepton. • Zum Speichern Diskettensymbol rechts oben drücken und halten bis zum Piepton. • Bei Dichtungswechsel das zweite Icon von oben links gedrückt halten bis zum Piep. <p>Zum Speichern Diskettensymbol in derselben Zeile rechts gedrückt halten bis zum Piep.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Zurückkehren ins Hauptmenü Autoklav-Icon mehrfach antippen

E9 Recorder (Seriennr. beginnt mit EID..., EIE...)



1. Schraubenschlüssel  im Display antippen.
2. Stethoskop  antippen.
3. Die Ziffern 1, 0 antippen.
4. Eingabe mit dem grünen Haken  bestätigen.
5. Main Counters antippen.
6. Die Meldung Reset Counters mit grünem Haken  bestätigen.

E9 (ohne Touch-Display)

1. Linke Taste unterhalb des Displays drücken bis Auswahl Hauptmenü
2. Mit mittlerer Taste bestätigen.
3. Untermenü Wartung anwählen, mit mittlerer Taste bestätigen
4. Untermenü Außerordentliche Wartung, mit mittlerer Taste bestätigen
5. 3 x mittlere Taste für Reset Filter drücken.
3 x rechte Taste für Reset Türdichtung drücken.

Weitere Videotutorials finden Sie unter youtube.com/EurondaDeutschland.