

To Do Täglich

1. Türdichtung reinigen / abwischen und kontrollieren.
2. Funktion der Spülarme kontrollieren.

To Do Wöchentlich

1. Füllmenge der Reinigungsmedien kontrollieren.
 - Reiniger
 - Klarspüler
 - Regeneriersalz
2. Edelstahlfilter der Injektorschiene kontrollieren.
 - ggf. Reinigung im Ultraschallbad
3. Siebe und Filter in der Kammer kontrollieren.
 - ggf. Reinigen
4. Daten auslesen und sichern.

To Do Jährlich

- Instrumente im Ultraschallbad mit Reinigungsmitteln reinigen, gut abspülen und trocknen.

Tipps bei der Beladung des RDG

- Keine Desinfektion vor der Reinigung (Instrumente ohne Desinfektionsmittel oder Reiniger im Ultraschallbad vorreinigen)
- Lösungsreste aus einer Vorreinigung abspülen.
- Zangen und Scheren müssen geöffnet sein.
- Absaugkanülen stehend reinigen.
- Für 2-seitige Instrumente ein Waschtray oder Sieb nutzen.
- Bohrer in geeignetem Bohrerständer lagern, optional Sieb für Kleinteile verwenden.
- Keine beschädigten Instrumente im Eurosafe 60 einsetzen.
- Gegenseitige Abdeckung vermeiden – Spülschatten.

Tipps nach Programmende

- Klappe öffnen, damit Restfeuchte und –wärme entweichen kann.
- Instrumente abkühlen lassen.
- Hand- und Winkelstücke mit Luft durchblasen.
- Abschließende Pflege der Instrumente nach Herstellerangaben.

Hinweise im Störfall

- Die Tür des RDG ist nach einer Fehlermeldung verriegelt:

Im Falle einer Blockierung des Gerätes während eines Spülvorgangs bleibt die Tür verriegelt. Zum Öffnen der Tür nachstehende Tastenfolge drücken:

1. Gleichzeitig die Tasten STOP  und START  für 5 Sekunden drücken.
2. Anschließend Taste Programm P2  und Taste Programm P1  nacheinander drücken.
3. Nach der abschließenden Bestätigung befindet sich der Thermodesinfektor im Ruhezustand..