


DURCHFÜHRUNG

Probenerstellung für die Siegelnaht-Festigkeitsprüfung
nach DGSV Leitlinie DIN EN ISO 11607-2 (Stand: 03/2015)



Bitte füllen Sie das Formular aus

- Es werden Angaben zu Ihrem Siegelgerät und den verwendeten Verpackungsmaterialien benötigt.

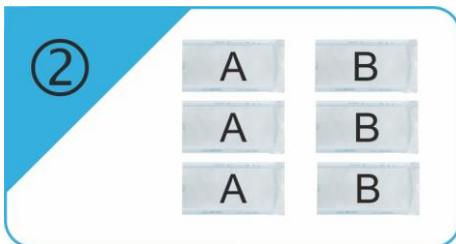

Versiegeln Sie je 3 Beutel pro Hersteller jeweils die größte Folienbreite – jede Folie einzeln

- Beutel regulär an der offenen Seite verschließen.
- Bei Rollen, Stücke von 30 cm Länge an beiden Seiten versiegeln. Abstand zwischen den Siegelnähten mindestens 20 cm!




- Die Berechnung der Siegelnaht-Festigkeitsprüfung erfolgt pro Folien-Hersteller.



Optische Prüfung der Siegelnähte

- Intakte Siegelung über die gesamte Breite
- keine Kanalbildung oder offene Stellen
- keine Durchstiche oder Risse
- keine Delaminierung oder Ablösungen

Sollten die Siegelnähte Mängel aufweisen, wiederholen Sie Schritt 2.

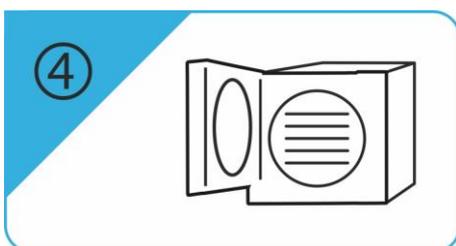

Sterilisation der Beutel

- Sterilisieren Sie alle versiegelten Beutel des gleichen Material mit dem festgelegten Sterilisationsprogramm.
- Beutel mit der Chargennummer beschriften.



Versand

- Verwenden Sie einen großen Umschlag für den Versand.
- Die versiegelten und sterilisierten Beutel dürfen nicht geknickt werden!

Für eventuelle Rückfragen nennen Sie uns bitte Ihren Ansprechpartner.

ANTWORTFORMULAR

Probenerstellung für die Siegelnaht-Festigkeitsprüfung
nach DGSV Leitlinie DIN EN ISO 11607-2



Praxis:

Name: Ansprechpartner: Straße: PLZ Ort: Telefon: E-Mail:		Stempel Unterschrift: Datum:
---	--	---

Hersteller und Typ des Foliensiegelgerätes:

--

Herstellerseriennummer Foliensiegelgerät:

--

Hersteller und Typ Autoklav:

Seriennummer:

--

Kritische Parameter (sofern ablesbar):

Temperatur:	T =	°C
Anpresskraft/-druck:	p =	N
Siegelzeit:	t =	sek.
Geschwindigkeit:	v =	m/min

Verpackungsmaterial Hersteller / SBS Typ:

<input type="checkbox"/> EN 868-4 (Papierbeutel)
<input type="checkbox"/> EN 868-5 (Klarsichtbeutel)
<input type="checkbox"/> HDPE (Tyvek® Klarsichtbeutel)
<input type="checkbox"/> Seitenfalte
<input type="checkbox"/>